

Instruktion

Tag bandagen ud af posen og læg den direkte på hestens ben efter konkurrence eller hård træning. Køling vil starte omgående og temperaturen vil reduceres med 8 – 10 grader Celcius.

Køleeffekten varer 2 – 3 timer.

Bandagen kan forblive på benet til den er tør.

Såfremt man ønsker kun at køle f.eks 1 time – så vær opmærksom på at så længe den er våd kan den fortsætte sin køleeffekt næste gang den pakkes ud.

Hvis man fjerner bandagen, før den er tør, kan den opbevares lufttæt og genbruges.

Bandage

1. Tag bandagen ud af posen.
2. Tag det elastiske stykke og klemmerne af.
3. Læg bandagen på nedefra og op.
4. Bandagen pålægges med et overlap på ca. 50 %
5. Brug klemmerne til at lukke bandagen
6. ræk det elastiske stykke uden på .
7. Lad bandagen være fri – dvs. den må ikke tildækkes.

Genbrug af bandage

1. Placer den vaskede og tørrede bandage i denne lynlåspose.
2. Tøm indholdet af en refill pose ned i lynlåsposen.
3. Bandagen vil absorbere væsken på 10 sekunder.
4. Lad bandagen trække 60 sekunder før pålægning.



Hold din hest
i topform
med Neo-Ice®
kølebandager

Neo-Ice®

THERAPEUTISK KULDEBEHANDLING

Hvad er køleterapi?

Anvendelse af kulde til behandling af skader eller sygdom er almindeligt udbredt inden for sportens verden. Det er en anerkendt metode til behandling af akutte vævsskader.

Kulde anvendes for at reducere restitueringstiden som et led i genoptræningsprogrammer efter akutte skader og i behandlingen af kroniske skader samt til effektiv reducere af smerter i postoperative perioder i forbindelse med rekonstruktionskirurgi af led.

Hvorfor anvende Neo-ice®?

Overanstrengelse kan føre til beskadigelser af muskler, ledbånd og sener. Nedkøling og kompression er effektivt til at reducere og/eller eliminere hævelser.

Produktet reducerer hudens temperatur med op til 10°C i en periode på op til 2½ time.

Fordelene ved Neo-ice®

- Reducerer/eliminere hævelser
- Skaden kan behandles på stedet
- Klar til brug
- Kræver ikke opbevaring i køleskab
- Nem at medbringe, håndtere og anvende



I forbindelse med konkurrencer, genoptræning og førstehjælp trækker Neo-ice smertekølede forbindelser varmen ud af en legemsdel med det formål at reducere ubehag og den tid, det tager at komme over skaden. Når de anvendes iflg. anvisningen, reducerer de omgående hudens temperatur og trækker med tiden varmen ud inde fra legemsdelen. Kombinationen af nedkøling og kompression hæmmer effektivt hævelser.

Risikofri nedkøling

Legemsdelens temperatur kommer ikke under 26°C.

Fakta om Neo-ice® kulde & tryk bandager

- kulde & tryk reducerer inflammation
- der skal ikke bruges kølekapacitet
- klar til brug
- kan genbruges
- portionspakninger der er nemme at anvende
- lette at bruge
- lille vægt og nemme at opbevare

For yderligere information:
www.neo-ice.dk
eller telefon 20138876